

NOXERO GOCCE OCULARI IDRATANTI

20 Flaconcini monodose da 2 ml

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

DESCRIZIONE

NOXERO è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione salina sterile, isotonica, a pH fisiologico, priva di conservanti e composta da sostanze naturalmente presenti nel film lacrimale. Grazie alla particolare composizione quali-quantitativa, la formulazione NOXERO possiede proprietà idratanti e umettanti e può essere utilizzata per idratare la superficie oculare nei casi di irritazione e secchezza. NOXERO è indicato per l'irrigazione e il lavaggio del sacco congiuntivale.

INDICAZIONI D'USO

OCCHIO SECCO

NOXERO è indicato per l'attenuazione della sintomatologia dell'occhio secco, di forma moderata, dovuto sia a cause estrinseche che intrinseche quali:

- Condizioni ambientali sfavorevoli
- Uso di lenti a contatto

INTERVENTI CHIRURGICI

NOXERO è inoltre indicato a seguito di interventi chirurgici, in particolare post chirurgia refrattiva.

LENTI A CONTATTO

BAMBINI

NOXERO può essere utilizzato anche dai bambini previa consultazione medica.

ISTRUZIONI D'USO

- 1) Lavare le mani accuratamente.
- 2) Staccare un flaconcino monodose.
- 3) Ruotare il tappo e tirare delicatamente l'estremità per aprire il monodose. Conservare il tappo per poter richiudere il monodose.
- 4) Premere delicatamente il monodose ed instillare 2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto.
- 5) Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il monodose con l'apposito tappo capovolgendolo. Prestare attenzione affinché il contenitore sia correttamente chiuso e che il tappo non entri in contatto con altre superfici per evitare la contaminazione dell'erogatore e quindi della soluzione. Il contenuto rimasto all'interno del monodose può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, sodio citrato diidrato, acido cloridrico 2N, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è esclusivamente per uso oftalmico.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore è danneggiato o se il monodose non è perfettamente chiuso e/o integro.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità dell'erogatore.
- Non usare il prodotto in caso di nota ipersensibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere immediatamente il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto oltre la data di scadenza.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

La confezione è composta da 4 strip sterili ciascuno formato da 5 monodose richiudibili da 2 ml.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e e su ciascun monodose.

NOXERO gocce oculari è disponibile in commercio anche nella confezione polidose - FLACONE DA 10 ML senza conservanti.

Data ultima revisione: 02.01 del 06/2020



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (Bo) - Italia



0373

DISPOSITIVO
MEDICO

STERILE A

Distributore esclusivo: Selkis Farmaceutici Srl
Via Monastero 104 - 17026 Noli (SV) - Italia

NOXERO GOCCE OCULARI IDRATANTI

Flacone da 10 ml senza conservanti

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

DESCRIZIONE

NOXERO è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione salina sterile, isotonica, a pH fisiologico, priva di conservanti e composta da sostanze naturalmente presenti nel film lacrimale. Grazie alla particolare composizione quali-quantitativa, la formulazione NOXERO possiede proprietà idratanti e umettanti e può essere utilizzata per idratare la superficie oculare nei casi di irritazione e secchezza. NOXERO è indicato per l'irrigazione e il lavaggio del sacco congiuntivale.

INDICAZIONI D'USO

OCCHIO SECCO

NOXERO è indicato per l'attenuazione della sintomatologia dell'occhio secco, di forma moderata, dovuto sia a cause estrinseche che intrinseche quali:

- Condizioni ambientali sfavorevoli
- Uso di lenti a contatto

INTERVENTI CHIRURGICI

NOXERO è inoltre indicato a seguito di interventi chirurgici, in particolare post chirurgia refrattiva.

LENTI A CONTATTO

BAMBINI

NOXERO può essere utilizzato anche dai bambini previa consultazione medica.

ISTRUZIONI D'USO

- 1) Lavare le mani accuratamente.
- 2) Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia.
- 3) Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione.
- 4) Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sul flacone per instillare 2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto.
- 5) Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone con l'apposito tappo.
- 6) Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, sodio citrato diidrato, acido cloridrico 2N, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è esclusivamente per uso oftalmico.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore è danneggiato o se il flacone non è perfettamente chiuso e/o integro.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità dell'erogatore.
- Non usare il prodotto in caso di nota ipersensibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere immediatamente il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto oltre la data di scadenza.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

La confezione è composta da un flacone polidose con sistema di chiusura OSD (ophthalmic squeeze dispenser), contenente 10 ml di prodotto privo di conservanti.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta del flacone.

NOXERO gocce oculari è disponibile in commercio anche nella confezione monodose - 20 FLACONCINI MONODOSE 2 ML

Data ultima revisione: 02.01 del 06/2020



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (Bo) - Italia

 0373 **DISPOSITIVO MEDICO**

STERILE A

Distributore esclusivo: Selkis Farmaceutici Srl
Via Monastero 104 - 17026 Noli (SV) - Italia